

# Simple Bath *fino*

シンプルバス フィーノ [SP110/SP100]



AMANO®

追求したのは、  
本当に必要な機能の  
使いやすさです。

02

## 軽さをもっと。

- 約50% (当社比) 軽くなったバッテリーで  
ストレッチャー操作がラクに



03

## 安心をもっと。

- 大型のサイドフェンスで大きな安心感をプラス
- 高温異常をLEDランプの点滅で知らせます



01

# 使いやすさをもっと。

- ストレッチャーと浴槽がスッと連結する機構
- 車輪のロックを2輪同時に簡単に
- 片手でもしっかり持てるバッテリー形状
- 枕と足受けの調節を簡単に



「あっ、ラク!」そんな声を聞きたくて、細部までこだわりました。

## 電動ストレッチャー

電動ストレッチャー【SP100-ST】

### feature

#### 軽く扱いやすいバッテリーパック

上昇に約22秒、下降に約17秒、昇降時の音も静かです。バッテリーは1回充電あたり約50回昇降可能です。

■ 軽いから操作がラクラク  
当社は従来比で50%軽量化しました。ストレッチャー操作時の負担が軽減されます。

■ 握りやすさがアップ  
形状を見直しました。片手でもしっかり持つことができます。取り外しや充電がスムーズに行えます。



#### 担架を昇降できるリモコン

ストレッチャーの担架昇降はリモコンで手元操作できます。



#### 入浴者の体格に合わせて調節できる担架

手動・自動の2段階+フラットのリクライニングが可能です。枕位置も簡単に調節できます。



#### 自動でリクライニング

担架がフラットな状態で入浴しても、自動でリクライニングして上体が起きます。



#### 安心のサイドフェンス

昇降中や入浴中に安心感のある大型フェンスです。

#### 操作しやすい大型ハンドル

持ちやすい大型ハンドル。操作をしやすいスムーズに動かします。



#### 浴槽とのドッキングがスムーズ

浴槽側のガイドレールに合わせてスムーズにドッキングします。



のせかえ作業の労力軽減  
速いすの産面とストレッチャーの担架面の高さを同じにすることができます。



## 浴槽

フィーノ【SP110/SP100】

## TYPE 01 SP110

シャワーと湯温調節機能を備えたモデル



### ストレッチャーを昇降させて、入浴/出浴をします。

ストレッチャーのリモコンの下降ボタンを押している間、ゆっくりと担架が下降します。ボタンから指を離せばすぐに停止する安全設計です。

### 初めての操作でも簡単に安心なミキシング。

湯はり量、シャワー湯量、温度の調節がダイヤル式で操作が簡単です。浴槽の温度が高湯になるとランプが点滅してお知らせします。



## TYPE 02 SP100

グループホームや高齢者住宅などの小規模施設に最適!



SP110/SP100 | 電気工事不要! 置くだけで重度化に対応!

浴室内の電気設備が必要ありません。給湯・給水、排水設備があれば導入が可能です。大がかりな改修工事することなく従来浴槽の導入が可能です。

Compact Chairbath

# shuttle

コンパクトチェアバス「シャトル」

新湯タイプ (A88R)      ろ過タイプ (A88RS)

コンパクトサイズでも、  
ゆったりくつろげる。



## 入浴ケアに沿った3つのチルトモード

STEP 1 シートが前傾する“のせかえ”モード



ポイント  
POINT

Change  
移乗もラクラクで、  
介助者の負担を軽減。

- 横乗り車いす「ラクーネ」  
「ラクーネ」と組み合わせれば、より簡単に移乗がおこなえます。



推奨品  
横乗り車いす  
「ラクーネ」



“持ち上げない”  
移乗をご提案

“持ち上げる”ことは腰痛のリスクを高め、介助者自身の健康も害することになりかねません。介護現場において腰への負担となる作業を、1つでも減らしたいとアマノは願います。

詳しくはP6をご覧ください。

STEP 2 中腰作業にさせない“搬送”モード



ポイント  
POINT

Chair Tilt  
腰痛予防を追求した  
スムーズチルト機構。

Tilt チルトリクライニング機構

- 入浴者にやさしい楽々チルト  
チルト操作が軽くさらにスムーズに行えるようになりました。スイングするように入浴姿勢にチルトします。“脚上げ連動リクライニング”により腰への負担を軽減します。



3段階のチルトモード

脚上げ連動リクライニングにより脚上げ作業が不要!

ONE POINT 脚は意外と重い  
下肢の重量は体重の約1/6です。  
体重60kgの人なら脚の重さは10kg。  
中腰での脚上げ作業は重労働です。



STEP 3 家庭の「お風呂」に近い“入浴”モード



オーバーフローライン

(入浴モデル:身長150cm)

ポイント  
POINT

Shower chair  
細部までこだわった  
快適なシャワーチェア。

- はね上げ式フットレスト  
はね上げ式フットレストだから、足のばせて快適に入浴できます。



- 入浴される方に近いフォルム

入浴される方が直接触れる部分はマット形状を人体の3次元の形に合わせることで、クッション性・ホールド性・フィット感を向上させています。





Compact



コンパクトで扉がないからアプローチも簡単。

扉がないので  
あらゆる方向から  
アプローチできます。

貯湯タンクは左右  
どちらにも置けるので、  
レイアウトの幅が広がります。

☑ ユニットバスにも導入可能。




導入例 積水ホームテクノ株式会社  
3350ユニットバス

● 身長約150cmの方の入浴イメージ



● 身長約180cmの方の入浴イメージ

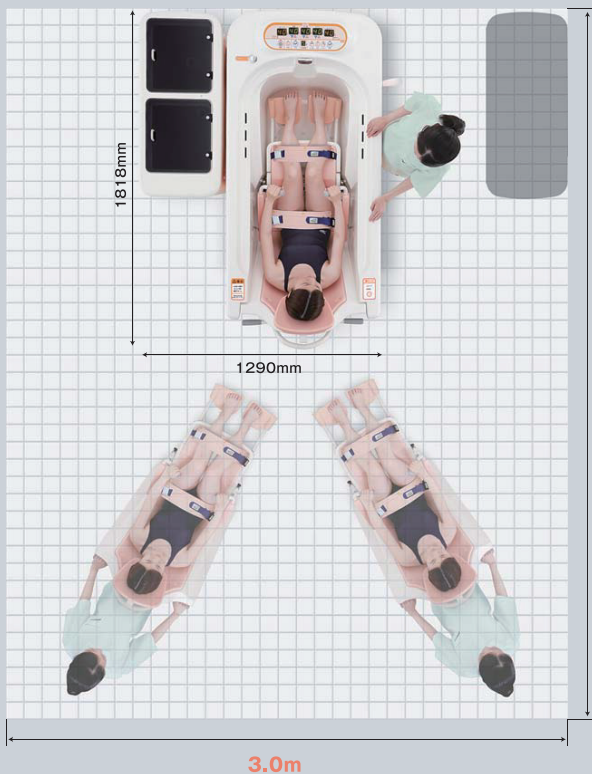

safety



安心の全温度管理システムと衛生管理。

タンク内温度、浴槽内温度、たし湯温度、シャワー温度の  
全てを管理するシステムを採用。

タンク内温度

貯湯タンク内の温度が36~44℃でない  
場合には、入浴スイッチを押しても浴槽へ  
送湯されません。

35℃以下、又は45℃以上の場合  
入浴スイッチは無効

貯湯タンク洗浄

● 湯温確認としっかり洗える  
貯湯タンク。

フタを開けて直接手で湯温の確認ができます。  
また、フタを開けてしっかり洗えます。



たし湯温度

48℃以上の湯が出ると、給湯が自動で  
ストップします。

高温異常は自動ストップ

シャワー温度


45℃以上の湯が出ると、給湯が自動で  
ストップします。

高温異常は自動ストップ

浴槽内温度

45℃以上になると浴槽内の湯は自動排水  
(る過タイプはタンクへ戻る)されます。

高温異常は自動排水

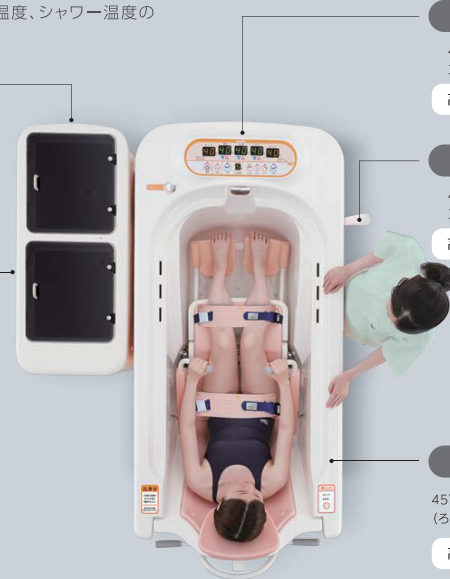

≫ Design デザイン

● 視認性がアップし、  
操作も簡単。

さらにわかりやすいアイ  
コンデザインを採用。入  
浴時間や動作状態も表示  
します。見やすい表示と簡  
単操作で、はじめての介  
助者でも安心です。

※カタログ説明のため全ての  
表示をしています。



(A88R)



(A88RS)

≫ Air Bubble 気泡発生装置

● より快適な入浴を。

リラックスタイムをより  
快適に過ごしていただ  
けるように、気泡発生装  
置を標準装備。逆流防  
止弁の採用により、給湯  
を衛生的に保ちます。



● 非常時の扉解除も万全

万が一の「扉ロックスイッチ」の故障や  
停電時には「停電時扉解除スイッチ」  
もしくは、付風のTグリブ六角レンチ  
により出浴がおこなえます。



(A88RS)